

## اطلاعات محصول

- تمامی جای زخم های ناشی از مواد زیر قابل رفع شدن می باشند:
- جراحی عمومی و یا زیبایی
  - ضرب دیدگی
  - زخم های کهنه
  - سوختگی
  - گاز گرفتگی
  - آکنه و جوش
  - و سایر اسکار های ناشی از بیماری های پوستی مختلف

سیلیکون درمانی طبق آخرین توصیه های پزشکی، استاندارد طلایی بوده و باید به عنوان اولین خط درمانی به منظور رفع اسکارهای هایپرتروفیک و کلونید ها در نظر گرفته شود.

محتویات: پلی دی متیل سیلوکسان، سیلوکسان ها و مشتقات آن.

## موارد استفاده

فانتوسیل به منظور پیشگیری و درمان اسکارهای هایپرتروفیک و کلونید استفاده می شود.

همچنین می تواند برای نتایج بهتر در کنار درمان هایی همچون لیزر، پلاسما تراپی، جراحی برشی و ترمیمی، داروهای رفع کننده تزریقی و گان های فشاری مورد استفاده قرار گیرد.

فانتوسیل حاوی پارابن، الکل و هیچ ماده دارای بو نیست. این ژل برای تمامی افرادی که پوست حساس دارند همچون کودکان قابل استفاده بوده و هیچ واکنشی ایجاد نمی کند. همچنین در دوران نوزادی، بارداری و شیردهی نیز قابل استفاده می باشد.

فانتوسیل یک ژل سیلیکونی خشک شونده سریع و غیر چسبنده می باشد که برای درمان اسکار های (جای زخم) جدید و قدیمی کاربرد موثر دارد. این ژل بر خلاف خیلی از محصولات مشابه که از تکنولوژی Liquid Film-forming استفاده می کنند، از تکنولوژی Solid Film-forming استفاده می کند که منجر به اثربخشی بالا و مقاومت آن روی پوست می شود و در نتیجه تنها ۲۴ ساعته ساخت ایران می باشد.

هنگامی که طبق دستورالعمل مصرف شود، روی پوست خشک شده و تشکیل یک لایه نازک محافظ می دهد که به گازها نفوذ پذیر بوده اما ضد آب می باشد. این لایه منجر به حفظ رطوبت شده و همچنین از نفوذ مواد شیمیایی و میکروب ها نیز به پوست جلوگیری می کند. این موارد منجر به جلوگیری از ساخت کلاژن اضافه شده و پوست را به حالت طبیعی بر می گرداند.

فانتوسیل در بلند مدت منجر به نرم و صاف شدن جای زخم و در کوتاه مدت منجر به کاهش خارش، قرمزی و رنگ های ناهنجار جای زخم می شود. همچنین با ایجاد حس مخملی مانند روی پوست حس خوشایندی را القا می کند.

فانتوسیل به راحتی روی پوست پخش می شود، به عنوان مرطوب کننده عمل می کند، ضد آفتاب می باشد و می تواند روی صورت، پلک، گردن و حتی نواحی که مو دارند به راحتی استفاده شود.

## نحوه استفاده

ابتدا محل استعمال را تمیز کرده و کامل خشک نمایید.

مقدار خیلی کمی را روی اسکار گذاشته و به مدت ۵ ثانیه ماساژ دهید تا به صورت یک لایه بسیار نازک، روی محل جای زخم و اطراف آن را در برگیرد.

در صورتیکه به صورت صحیح استفاده شود ظرف مدت ۲ تا ۴ دقیقه خشک می شود. در غیر اینصورت، مقدار زیادی روی پوست قرار گرفته که باید با دستمال کاغذی اضافه آن برداشته شود.

زمانیکه فانتوسیل خشک شد، می توان از کرم های ضد آفتاب، مواد آرایشی مختلف و سایر موارد پوستی بدون هیچ تداخلی استفاده کرد.

ژل فانتوسیل یک بار در روز بنا به تجویز پزشک باید استفاده شود چرا که تماس پیوسته و متناسب با پوست منجر به اثرگذاری ایده آل جهت رفع جای زخم می شود.

این ژل پس از خشک شدن هیچ جایی بر روی پوست باقی نمی گذارد و با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست. همچنین ضد آب بوده و با آب پاک نمی شود.

## طول دوره درمان

در صورت مصرف روزانه به صورت دائم ۶۰ تا ۹۰ روز زمان می برد تا جای زخم ناپدید شود. توصیه می شود تا زمانیکه دیگر تغییری دیده نمی شود مصرف ادامه پیدا کند.

## مقدار مصرف

-فانتوسیل ۵ گرم: برای اسکار خطی با اندازه ۲ تا ۳ سانتیمتری به مدت ۹۰ روز

-فانتوسیل ۱۰ گرم: برای اسکار خطی با اندازه ۵ تا ۷ سانتیمتری به مدت ۹۰ روز

-فانتوسیل ۲۰ گرم: برای اسکار خطی با اندازه ۱۰ تا ۱۴ سانتیمتری به مدت ۹۰ روز  
-فانتوسیل ۵۰ گرم: برای اسکار ناحیه ای با اندازه ۶ در ۱۲ سانتیمتری به مدت ۹۰ روز

## نکات قابل توجه

- فقط برای مصرف خارجی.
- به هیچ وجه روی زخم باز و یا سوختگی استفاده نشود.
- بر روی جوش درمان نشده استفاده نگردد.
- با مخاط چشمی تماس نداشته باشد.
- بدون مشورت پزشک استفاده نشود.
- در صورتیکه کامل خشک نشود لباس را آغشته می کند که با خشک شویی پاک می شود.
- پس از هر بار مصرف درب را محکم ببندید.
- در صورت بروز حساسیت مصرف را قطع نموده و به پزشک مراجعه کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.